

Richtiges Verzurren unserer
Rollstühle in Kraftfahrzeugen

molab
modulare **mobilität**

Hier geht's um Eure Sicherheit



Bitte aufmerksam lesen und allen in den
Fahrzeugtransport involvierten Personen
zur Verfügung stellen >>> **Safety First!**

Wir empfehlen, euch diese Broschüre gegenzeichnen zu lassen.
So ist - zumindest theoretisch - gewährleistet, dass der Rolli
immer vorschriftsmäßig gesichert wird

Quelle: <https://molab.de> > download > Sicherheit im Fahrzeug

Ich habe die Anweisungen gelesen und verstanden

Datum

Unterschrift

Stempel des Transportunternehmens

Folgende Anweisungen sind unbedingt zu beachten, um Schäden am Rolli und eventuelle Verletzungen zu vermeiden:

Zu festes, asymmetrisches Spannen der Gurte zerstört den Rahmen!

molab haftet weder für gesundheitliche noch für materielle Schäden, die auf falsches Verspannen zurückzuführen sind!

Haben Sie Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit der Sicherung Im Fahrzeug? Wir helfen gern!

Sie erreichen uns telefonisch:
+49 2303 539956

mobil (gern auch WhatsApp):
+49 173 5916634

oder per mail:
info@molab.de

1. Vor dem Spannen der Retraktoren müssen alle vier Gurte eingehängt sein! (vorn & hinten, jeweils links & rechts)
2. Die Sicherung ist ausschließlich über die hier sichtbaren Anschlußösen erlaubt!
3. Antikipp nach unten klappen und möglichst bodennah verriegeln!
4. Nur die beiden hinteren **oder** die beiden vorderen Retraktoren **handfest** spannen!
5. Nach **handfest** kommt **kaputt!** 😊
6. Erst nach dem Spannen: Bremsen anziehen! So verteilen sich die Kräfte optimal

